

SL URGO Afte Manjše ustne rane

Tekoči gel, pripravljen za takojšnjo uporabo, za oskrbo aft (1 do 2 afti, premora manj kot 1 cm) in manjših ran na ustni sluznici.

• Kaj je afta?

Je površinska poškodba ustne sluznice, ki se odraža z bolečo razjedo bele barve z ostrimi robovi in je obkrožena s svetlo rdeče obarvano sluznico. Vzroki za nastanek aft so slabo poznani, čeprav nekateri dejavniki lahko pospešijo njihovo pojavnost: dednost, nekatera hrana, fizikalna poškodba (grizenje ustne sluznice, zobne proteze), nekatera zdravila, stres ali hormoni.

• Kako Urgo filmogel za afte deluje?

Ob nanosu filmogela se ustvari vidna, tanka in prožna zaščitna plast, ki:

- **IZOLIRA** afto pred hrano in slino do 4 ure
- **OLAJSJA** bolečino hitro in trajno
- **POSPEŠUJE CELJENJE**

• Navodila za uporabo

Obrnite eno stran lopatice ob rob stekleničke. Z drugo stranjo lopatice potegnjte čez prizadeto mesto, da razmažete filmogel čez celotno površino afte ali manjše rane. Počakajte 10 sekund, da se posuši, nato zaprite usta; nastala bo vidna filmska plast. Če imate občutek, da afta ali ustna rana nista povsem pokriti, postopek ponovite. Nanesite 3- do 4-krat na dan, ne da bi odstranili predhodni nanos, po možnosti pred glavnimi obroki, in uporabljajte, dokler se povsem ne zaceli (3 do 5 dni). Zaradi vsebnosti alkohola v filmogelu se plastična lopatica ob vsakem stiku s stekleničko razkuži in jo zato po uporabi ni treba očistiti.

• Sestavine

Derivat celuloze, mineralna kislina, karboksilne kisline, alkohol, voda, aroma, sušaloza.

• Kontraindikacije

Ne uporabljajte pri večjih aftah (premera več kot 1 cm) ali herpetiformisu (številčne drobne ustne razjede), ki jih mora pregledati zdravnik.

Ne nanašajte na okužene rane, opekline ali globoke rane (krvaveče razjede).

Izdelka ne uporabljajte, če ste alergični na derivate salicilne kisline.

Uporaba je kontraindicirana pri nosečnicah in doječih materah ter otrocih.

Izdelek lahko uporablja samo osebe, starejše od 18 let.

• Opozorila

Po vsaki uporabi stekleničko dobro zaprite. Priporočljivo je, da filmogel porabite v šestih mesecih po prvem odprtju stekleničke. Izdelek nanašajte samo na sluznico ustne votline. Uporaba izdelka lahko povzroči prehoden neprijeten občutek v ustni votlini ali rahlo ščemenje. Ne nanašajte na zunanjou površino ustnic. Filmska plast se odlušči sama. Ne poskušajte je odluščiti na silo. Če se stanje ne izboljša po 5 dneh prekinite z uporabo in poiščite zdravniško pomoč. Shranujte nedosegljivo otrokom! Izdelka ne zaužijte.

Med uporabo izdelka, oziroma dokler se povsem ne posuši, ne smete kaditi. Prav tako ne smete kaditi v bližini odprte stekleničke. Če ste v dvomih, se posvetujte s farmacevtom. Pri ustnih ranah, nastalih zaradi nošenja zobnega aparata, je uporaba izdelka mogoča, če ga z zobnim aparatom ne prekrijete.

• Shranjevanje

Ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti, navedenem na embalaži.

Shranujte ločeno od odprtga plamena ali virov vžiga.

Shranujte pri temperaturi do 30 °C.

• Distributer:

Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana